



① カットが難しかったら便宜的にここからカットしてあとでセロテープで止める

【オリジナルの制作方法】

使用したもの、必要なもの

- ・サージテルオークリータイプ
- ・アイリスオーヤマ製の100μmA4サイズのラミネートフィルム
- ・ラミネーター
- ・この図面
- ・金冠バサミ
- ・セロハンテープ
- ・スタッフへの愛情

材料費

- ・約8円

制作手順

- ・ラミネートフィルムをそのままラミネーターで圧着
- ・図面はA4サイズで印刷
- ・図面の寸法は使用しているルーペの種類、レンズの位置、瞳孔間距離、オペキャップの有無、ガードしたい領域などによりカスタマイズしてください
- ・油性ペンでラインを引いてハサミでカット
- ・正中線上方の切り込みをセロハンテープで止める
- ・中央からルーペのレンズを通し、側方のカット部にゴーグルのテンプレを通し内側からセロハンテープでとめる
- ・センター上部のくぼみをレンズの留め具の前方にする
- ・接眼レンズをシールドにくぐらせるとシールドの位置が安定し、視界がシールドに遮られない

【チームIIHA】

PDF制作

テンプレ部の改良案

原案

広島県福山市 いたう歯科 伊東孝介

群馬県太田市 尾島デンタルクリニック 伊藤諒、林崎雅樹

東京品川区 オリーブ歯科 安藤如規